

## INSTRUCCIONES DE USO DEL KIT

### CONTENIDO DEL KIT

- Un **Formulario de solicitud**, a rellenar por el solicitante; en el reverso están indicadas las **Condiciones de Venta**
- La presente hoja de **instrucciones para la toma de muestras**
- Dos **hisopos estériles** guardados en una bolsita de plástico, para cada uno de los participantes a la prueba.
- Un sobre marrón de retorno para depositar el hisopo una vez utilizado, para cada uno de los participantes.
- Un sobre blanco para el retorno del KIT (a utilizar para retornar las muestras biológicas y el formulario de solicitud).

### PROCEDIMIENTO

1. Rellene el **Formulario de solicitud** con sus datos, lea las **Condiciones de Venta**, escriba el lugar, la fecha y firme el documento.
2. Lea las **instrucciones para la toma de las muestras biológicas** (hisopos) y proceda a su recogida siguiendo los pasos indicados.
3. Introduzca dentro del sobre blanco de retorno los elementos siguientes: los **sobres marrones con los hisopos**, el **Formulario de solicitud** y el **talón bancario, justificante de transferencia o justificante de pago on-line**. Cierre bien el sobre.
4. Envíe el sobre al laboratorio. Puede utilizar el correo ordinario, urgente o certificado. Para garantizar la entrega lo antes posible (de un día para otro) le recomendamos que suscriba los servicios de una mensajería (Seur, Nacex, DHL, MRW,...) o bien el correo certificado urgente.
5. Cuando recibamos el Kit, le informaremos por teléfono o por e-mail. Transcurrido de 3 a 5 días laborales después de la recepción de las muestras, el **informe de resultados** le será entregado, junto con la **factura**.

**NOTA:** Puede solicitar el **Servicio Urgente** de los análisis lo que le permitirá obtener los resultados en 24 horas desde el momento en recibamos las muestras biológicas. Este servicio tiene un coste adicional de 200 €.

## TOMA DE MUESTRAS

- 1** No se debe **comer, ni beber** nada al menos **30 minutos** antes de la obtención de la muestra de la mucosa bucal. **Enjuáguese** la boca con agua antes de la obtención de la muestra.

- 2** El Kit contiene varias bolsitas de plástico, una para cada individuo a analizar, con dos hisopos estériles cada una. A cada individuo se le asigna un color:

◆ Padre ◆ Hijo ◆ Madre

Tome una bolsita de plástico (por ejemplo: PADRE).




- 3** Extraiga **un hisopo** de la persona a obtener la muestra. No toque con las manos el extremo de algodón. Introdúzcalo en la **boca** y frote con firmeza la parte interna de la mejilla, **un mínimo de 20-30 veces**. Con el mismo hisopo, frote también el interior de la otra mejilla **un mínimo de 20-30 veces**. Asegúrese de que frota bien cada una de las partes internas de la mejilla. *Con cada hisopo debe frotar las DOS MEJILLAS*. **Repita** el proceso con el **segundo hisopo**.



- 4** Tire a la basura la bolsita de plástico. Deje **secar** los dos hisopos durante **1 hora** al aire libre, sin permitir que entren en contacto con nada. Por ejemplo, déjelo secar apoyado encima del sobre marrón correspondiente, con el algodón en el aire.



- 5** Una vez los hisopos secados, introdúzcalos en el sobre marrón y séllelos. **En ningún caso utilice las bolsitas de plástico**. *Es muy importante no mezclar los hisopos de diferentes personas; esto supondrá la anulación de la prueba.*

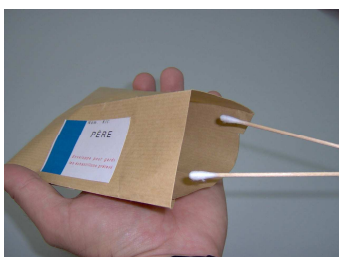

- 6** **Repita** el proceso con el **resto** de **individuos** a analizar con sus correspondientes hisopos.

**Para cualquier duda o aclaración puede llamar al laboratorio**

**Tel.: 973 834 070 (de 9h00 a 20h00; de lunes a sábado)**